

**МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ:
СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ МД SP N
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол медицинский предназначен для обслуживания, находящихся в кровати тяжелобольных при приеме пищи, чтении и письме.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	700
Ширина, мм	410
Высота, мм: – минимальная – максимальная	790 1150
Масса, кг	12
Распределенная нагрузка, кг	15-20

*-указана высота стола с установленными роликами
Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы изделия рекомендуется равномерно распределять нагрузку на поворотную столешницу, избегать чрезмерной нагрузки на края столешницы.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

- 5.1 Производите осмотр столика не реже 1 раза в месяц, осуществляя при необходимости подтяжку крепежа.
- 5.2 Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.
После очистки столик необходимо вытереть насухо.
- 5.3 Механическая чистка с использованием абразивных средств не допускается.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

- 6.1 Столик можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
- 6.2 Требования по хранению: в упаковке изготовителя, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха 80%.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
- 7.2 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол МД SP N изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

**МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ:
СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ МД SP N
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол медицинский предназначен для обслуживания, находящихся в кровати тяжелобольных при приеме пищи, чтении и письме.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	700
Ширина, мм	410
Высота, мм: – минимальная – максимальная	790 1150
Масса, кг	12
Распределенная нагрузка, кг	15-20

*-указана высота стола с установленными роликами
Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы изделия рекомендуется равномерно распределять нагрузку на поворотную столешницу, избегать чрезмерной нагрузки на края столешницы.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

- 5.1 Производите осмотр столика не реже 1 раза в месяц, осуществляя при необходимости подтяжку крепежа.
- 5.2 Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.
После очистки столик необходимо вытереть насухо.
- 5.3 Механическая чистка с использованием абразивных средств не допускается.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

- 6.1 Столик можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
- 6.2 Требования по хранению: в упаковке изготовителя, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха 80%.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
- 7.2 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол МД SP N изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____